

VISIÈRE DE PROTECTION ULTRA LÉGÈRE

*Confort et
protection*



PROTECTION OPTIMALE DES PROJECTIONS



Mousse Plastazote® compatible aux applications médicales (ISO 10993-1)



Visière flexible et facile à monter (aucune colle pour assembler le produit)



Confort grâce à la souplesse de la mousse et à la légèreté du produit (<20 grammes)




Produit lavable et désinfectable



Grand spectre visuel, avec aérations anti-buée



Compatible avec le port de lunettes de vue

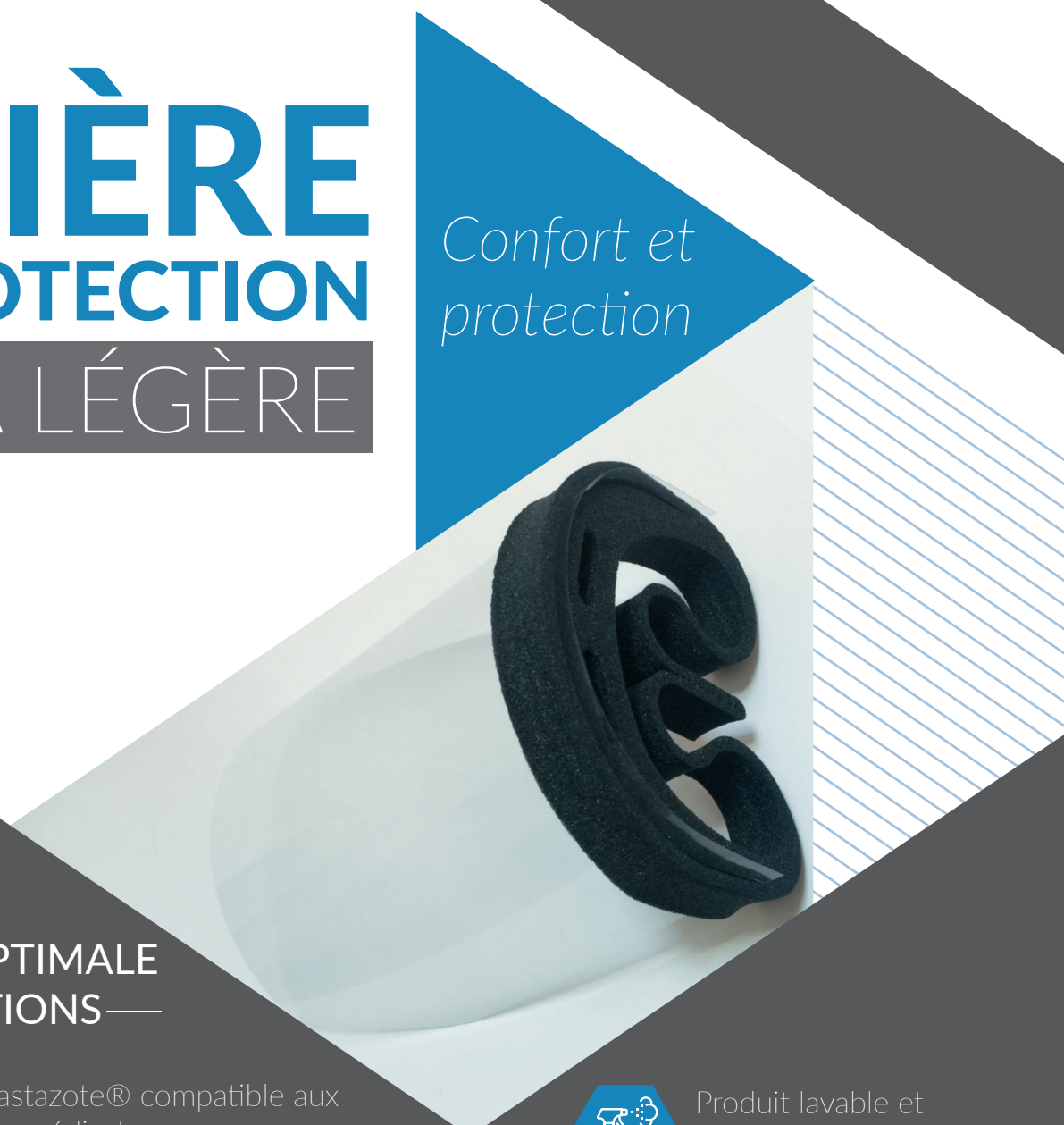

SA FORME ERGONOMIQUE, S'AJUSTE AU TOUR DE TÊTE

Afin d'accompagner les personnes en première ligne face à l'épidémie du COVID-19, C2PACK vous présente sa visière de protection.


Cet équipement est composé d'une visière et d'un serre-tête en mousse Plastazote® pour vous assurer un confort optimal et une protection contre les projections



1. Insérez la vitre par le dessus du serre-tête (coins coupés en bas, languettes en haut)

2. Une fois la vitre enfilée, rabattez les languettes sur le dessus du serre-tête

3. Tirez la grande languette vers l'arrière pour déployer le serre-tête

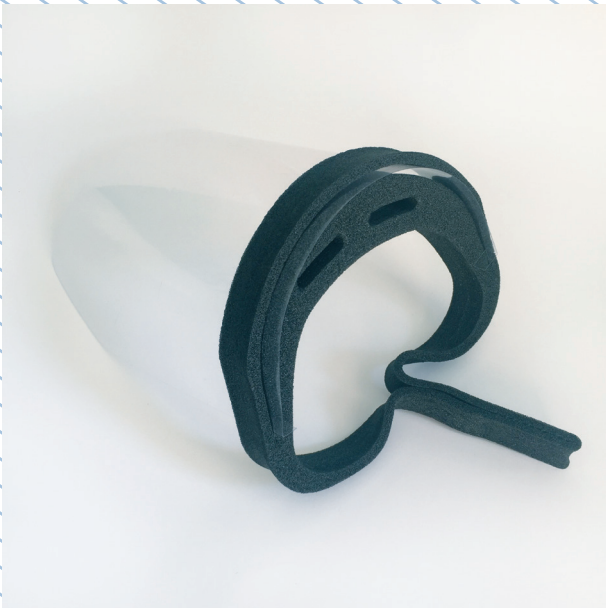

4. Posez-la sur votre tête, celle-ci s'adaptera en fonction de votre tour de tête grâce aux points d'attache déchirables de la languette.

Les serre-têtes sont disponibles en noir, gris ou blanc suivant disponibilité matière.